



アリケイア サポート

insmed®


アリケイア®による治療を受ける方へ

ラミラ®吸入器(ラミラネブライザシステム)の 操作ポイント

次の操作の際には「向き」に注意してください


エアロゾルヘッドを 薬液槽に取り付けます

「Lamira」という文字が読める向きに持ち、金色の突起を薬液槽の穴に取り付けます。

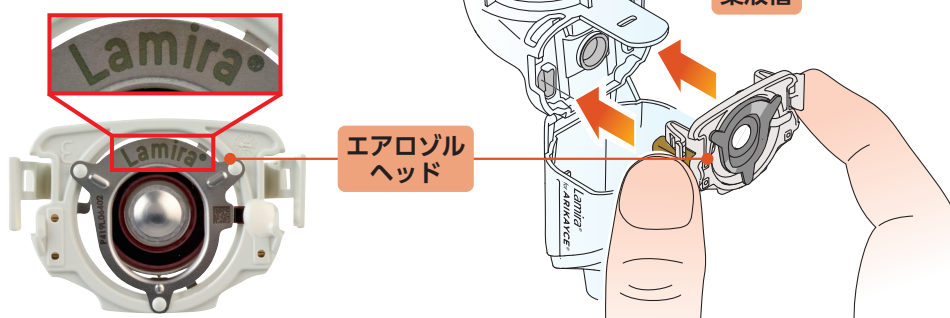


青バルブをエアロゾルチャンバに取り付けます

青バルブのフラップ(2枚の可動する部分)が下向きになるように持ち、エアロゾルチャンバにフタをするように取り付けます

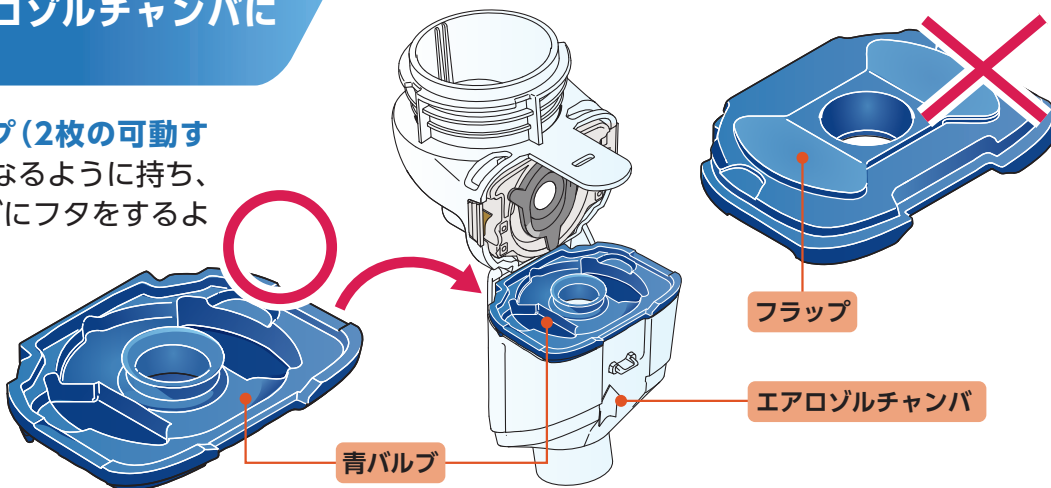

接続コードをラミラ吸入器に取り付けます

接続コードはラミラ吸入器の青い穴に差し込みます

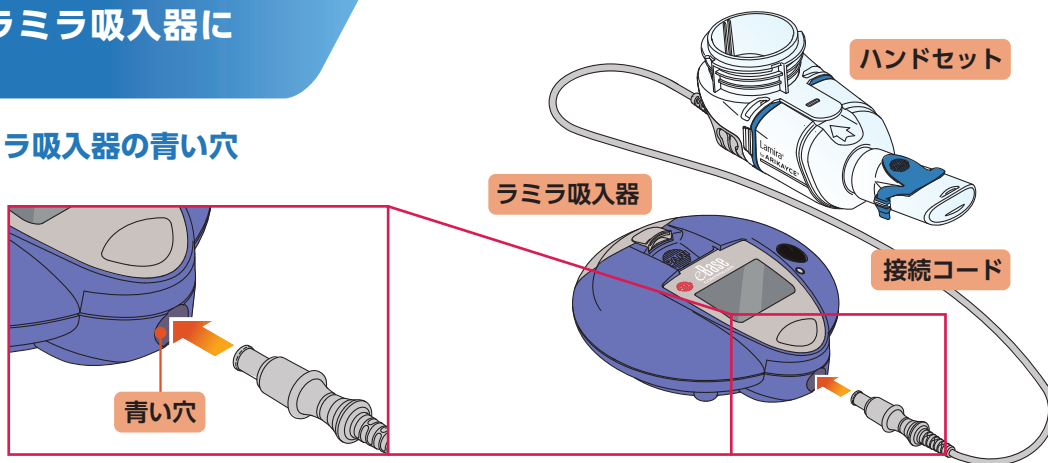

ラミラ吸入器(ラミラネブライザシステム)は、アリケイア(アミカシン硫酸塩 吸入用製剤)専用の吸入器です。他の薬剤の吸入に使用することはできませんのでご注意ください。ラミラ吸入器の使い方については、「ラミラ吸入器使い方ガイド」で詳しく説明していますので、併せてご確認ください。

アリケイアの販売名はアリケイア®吸入液590mgです。ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです。

Insmmed®, Insmmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイア® are registered trademarks of Insmmed Incorporated. Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH. All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

インスメッド合同会社

東京都千代田区永田町二丁目10番3号
東急キャピタルタワー13階

<https://insmed.jp>

【問い合わせ先】
メディカルインフォメーションセンター
電話: 0120-118808

2025年12月作成
PP-ARIK-JP-02350

© 2025 Insmmed GK. All Rights Reserved.