


③ 分解・洗浄



- ☐ お薬が薬液槽のなかに残っていませんか？
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか？

ハンドセットを分解する

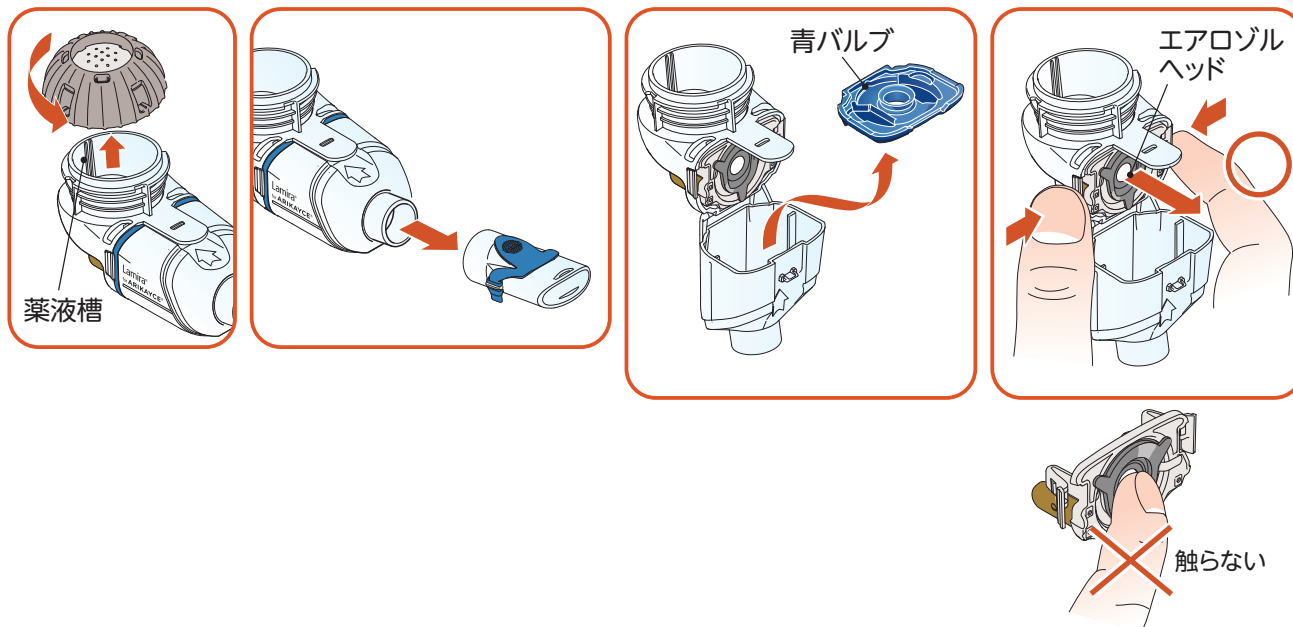

部品についているお薬を拭き取り、洗浄する

* 粉末状、クリーム状、白濁している洗剤は使わないでください



週に1回行う

エアロゾルヘッドは、1週間に1回、超音波クリーナーで洗浄する



洗浄が終わったら、ぬるま湯でエアロゾルヘッドをすすぐ



- ☐ 消毒のための道具は揃っていますか？
- ☐ 消毒に必要な時間を確認しましたか？

消毒する



- 蒸気式消毒器は、水道水(80mL)を使用する
- 煮沸消毒には、蒸留水あるいは、精製水(日本薬局方と記載のあるもの)を使用する


乾燥して保管

終了



ハンドセットは、1ヵ月ごとに交換します

新しいハンドセットを使用するときには、オレンジ枠にしたがって
洗浄と消毒を行います

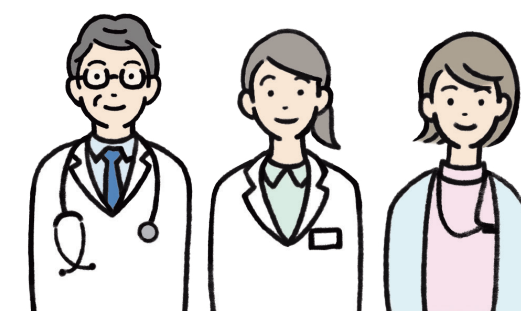

アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです

インスメッド合同会社
東京都千代田区永田町二丁目10番3号
東急キャピトルタワー13階
https://insmed.jp

【問い合わせ先】
メディカルインフォメーションセンター
電話：0120-118808








Insmed®, Insmed logo, インスメッド® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
PARI® is a registered trademark of PARI GmbH.
Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

① 器具の準備(組み立て)




- ☐ 手を洗いましたか?
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか?


ハンドセットを組み立てる

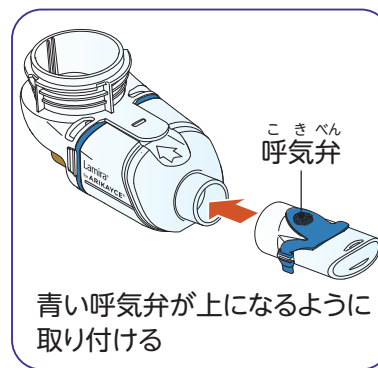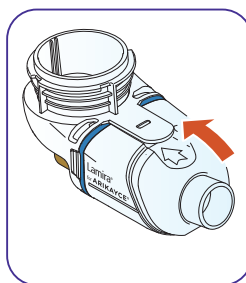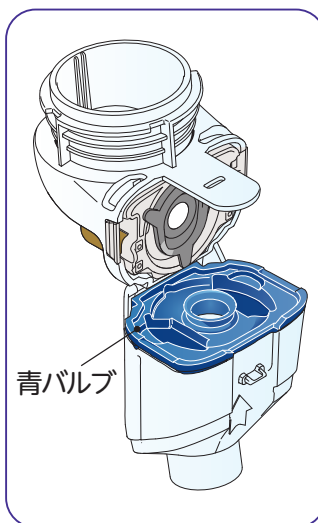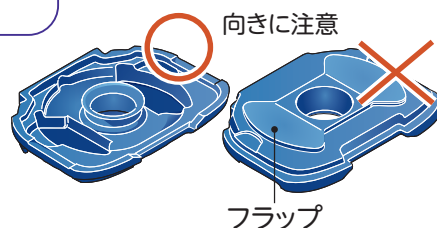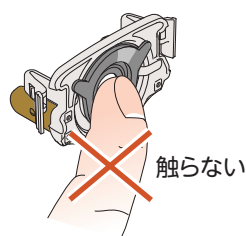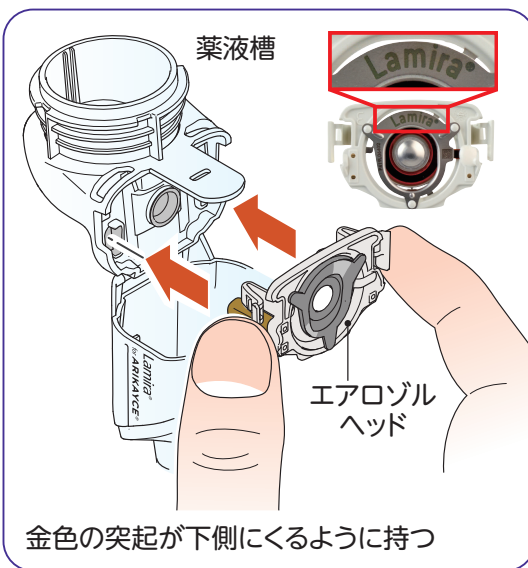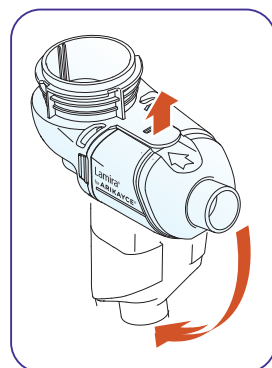


組み立て完了

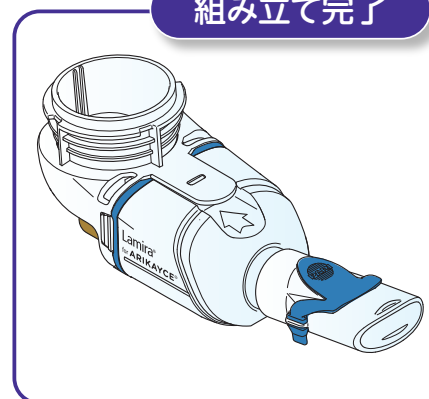

接続コードを取り付け、ラミラ吸入器と接続する




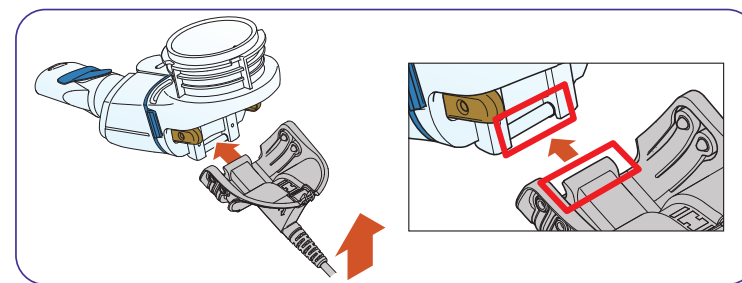


接続完了

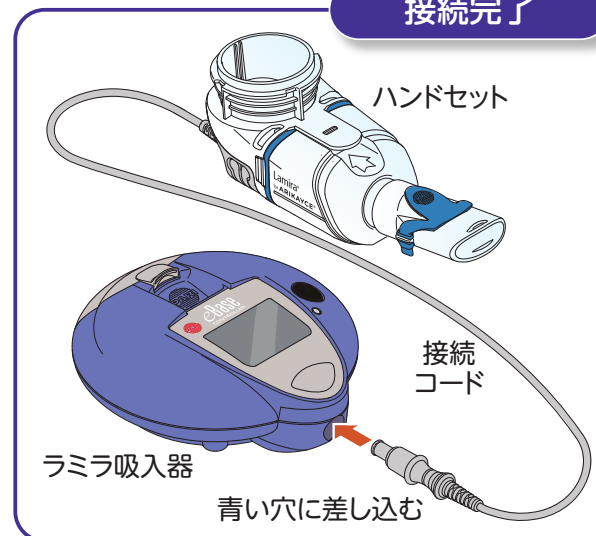


- ☐ お薬は室温に戻っていますか? **吸入する45分以上前に冷蔵庫から出しておく**
- ☐ まわりにヒーター、ストーブ、可燃性のガスなどはありませんか?


バイアル瓶を開けてお薬を入れる

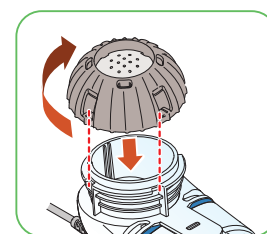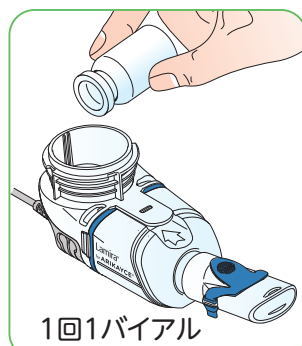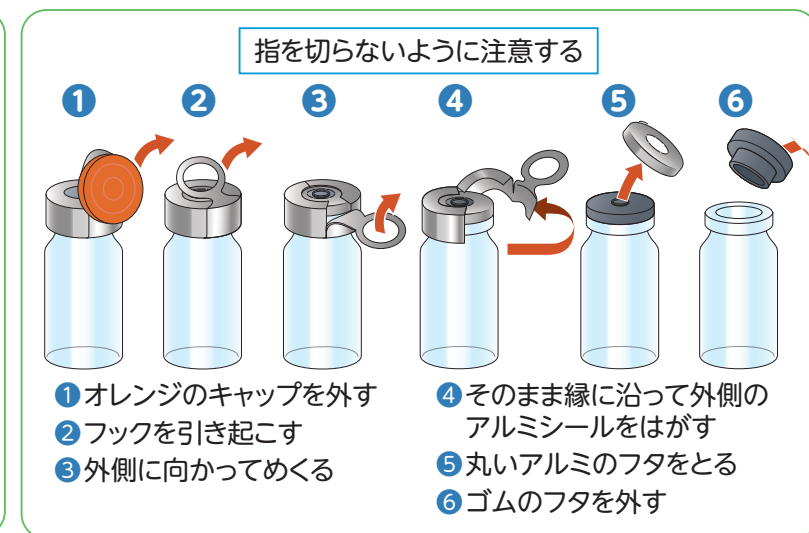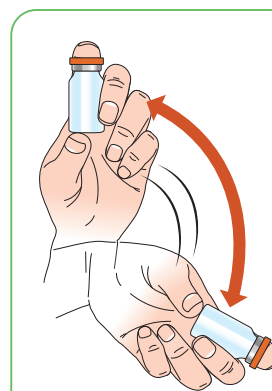


お薬の準備完了

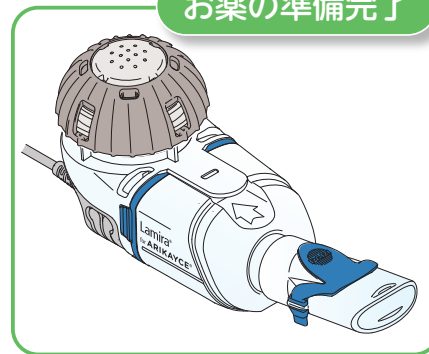

吸入する

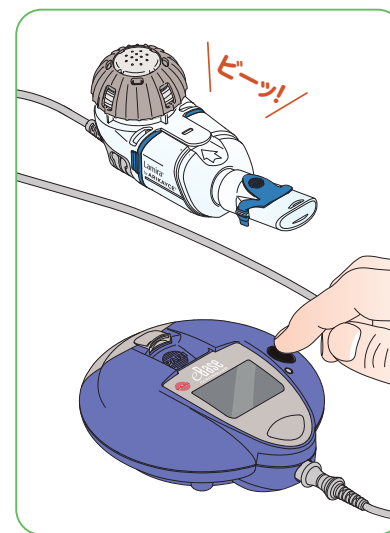

吸入開始のマーク

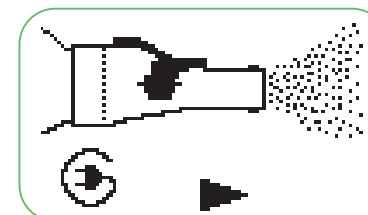

約14分間(最大20分間)で自動で止まる



② 薬の準備・吸入

沈殿がある場合は、沈殿がなくなるまで振り混ぜてください

バイアルオープナーは、バイアル瓶のスムーズな開封を補助するものです。バイアルオープナーの使い方は「バイアルオープナー使い方ガイド」をご覧ください

